

Analyses				PRE-ANALYTIQUE			ANALYTIQUE						NOMENCLATURE INAMI	Intérêt scientifique et commentaire	
Analyse	Mnémonique	ACTH	Réalisable en urgence	Type d'échantillons	Matériel_1	Volumeminimal à prélever	Technique	Méthode et appareil	Fréquence de réalisation	TAT	Valeurs de référence	Conservation	Code INAMI	Intérêt médical et scientifique	Responsable Technique
Coombs direct polyvalent	CDIR	AE47	oui	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon rose)	4,0 mL	Agglutination en colonne gel	IH500	7 jours/7	1 jour	Négatif	Stable 7 jours entre 2 et 8°C	555214	Recherche d'une fixation d'anticorps (allo- ou auto- anticorps) ou de complément à la surface des hématies dans le cadre d'anémies hémolytiques auto-immunes, du nouveau-né, immuno-allergiques ou de réaction transfusionnelle.	Emmanuelle Saccomando
Groupe sanguin (ABOD RH KELL)	GRO	AA10 - AA80 - AA85	oui	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon rose)	4,0 mL	Agglutination en colonne gel	IH500	7 jours/7	1 jour		Stable 7 jours entre 2 et 8°C	555015#555030	La détermination du groupe sanguin est réalisée dans le cadre de bilan pré-opératoire, de suivi de grossesse.	Emmanuelle Saccomando
Phénotypage érythrocytaire	PHEN		oui	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon rose)	4,0 mL	Agglutination en colonne gel	IH500	7 jours/7	1 jour		Stable 7 jours entre 2 et 8°C	554772 (M16) (D33)	Le phénotype érythrocytaire élargi est réalisé dans le cadre d'identification d'anticorps irréguliers ou chez des patients avec avenir transfusionnel important afin d'éviter la formation d'anticorps.	Emmanuelle Saccomando
Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI)	RAI	AE53Z AE45 - AE45A - AE45B - V0234	oui	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon rose)	4,0 mL	Agglutination en colonne gel	IH500	7 jours/7	2 jours	Négatif	Stable 7 jours entre 2 et 8°C	555155	La recherche d'anticorps libres est réalisée dans le cadre de suivi de grossesse, de bilan pré-opératoire.	Emmanuelle Saccomando
Recherche agglutinines froides	AGLF		non	Sérum (sans gel) à 37°	Tube sec (bouchon bleu) sans gel	2 X 6,0 mL	Agglutination en tube	IH500	7 jours/7	7 jours		Maintenir tube à 37°C	554816	Recherche d'anticorps antiérythrocytaires ayant la propriété d'agglutiner les hématies lorsque la température est inférieure à 37°C.	Emmanuelle Saccomando

Analyses				PRE-ANALYTIQUE			ANALYTIQUE							NOMENCLATURE INAMI	Intérêt scientifique et commentaire	
Analyse	Mnémonique	ACTH	Réalisable en urgence	Type d'échantillons	Matériel_1	Volume minimal à prélever	Technique	Méthode et appareil	Fréquence de réalisation	TAT	Unités	Valeurs de référence	Conservation	Code INAMI	Intérêt médical et scientifique	Responsable Technique
Hémoglobine glyquée (HbA1c)	HbA1	EC30 - EC30D	NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	chromatographie (HPLC) d'échange d'ions	G8 HPLC Analyser Tosoh *	7 jours/7	1 j	% et mmol/mol	<6,0 (%)#<42 (mmol/mol)	Stable 5 jours entre 2 et 8°C	540750	Le dosage de l'hémoglobine glyquée se fait dans le cadre du suivi du patient diabétique.	Emmanuelle Saccomando
Leucocytes	LEUC	AC05	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	cytométrie en flux avec fluorescence	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	10*3/mm3	< 1 jour : 10,0-26,0 (10*3/mm³)# 1 - 3 jours : 7,0-23,0 (10*3/mm³)#3 - 14 jours : 6,0-22,0 (10*3/mm³)# 14 jours - 1 mois : 5,0-19,0 (10*3/mm³)#1 - 2 mois : 5,0-15,0 (10*3/mm³)# 2 - 6 mois : 6,0-18,0 (10*3/mm³)#6 mois- 1 an : 6,0-16,0 (10*3/mm³)#1 - 6 ans : 5,0-15,0 (10*3/mm³)# 6-12 ans : 5,0-13,0 (10*3/mm³)# > 12 ans : 4,0-10,0 (10*3/mm³)	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127050		Emmanuelle Saccomando
Formule leucocytaire	FO	AC40 - AC50 - AC15 - AC45 - AC20 - ACS2 - AC35 - AC51 - AC30 - AC53	NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	cytométrie en flux avec fluorescence et microscopie optique	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	% et 10*3/mm3		Stable 48 heures entre 2 et 8°C et 24h TA	123196		Emmanuelle Saccomando
Erythrocytes	ERY	AB30	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Impédance	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	10*6/mm3	< 1 jour : 5,00-7,00 (10*6/mm³)#1 - 3 jours : 4,00-6,60 (10*6/mm³)#3 - 7 jours : 3,90-6,30 (10*6/mm³)# 7 - 14 jours : 3,60-6,20 (10*6/mm³)#14 jours - 1 mois : 3,00-5,40 (10*6/mm³)#1 - 2 mois : 3,10-4,30 (10*6/mm³)#2 - 6 mois : 4,10-5,30 (10*6/mm³)#6 mois- 1 ans : 3,90-5,10 (10*6/mm³)#1 - 12 ans : 4,00-5,20 (10*6/mm³)# > 12 ans (homme) : 4,50-5,50 (10*6/mm³)#> 12 ans (femme) : 3,80-4,80 (10*6/mm³)	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127035		Emmanuelle Saccomando
Hématocrite	HCTE	AB20	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Cumulation des hauteurs d'impulsion (calcul)	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	%	< 1 jour : 45-75 %#1 - 3 jours : 45-67 %#3 - 7 jours : 42-66 %#7 - 14 jours : 31-71 %#14 jours - 1 mois : 33-53 %#1 - 2 mois : 28-42 %#2 - 6 mois : 30-40 %#6 mois- 1 ans : 30-38 %#1 - 6 ans : 34-40 %#6-12 ans : 35-45 %#> 12 ans (homme) : 40-50 %#> 12 ans (femme) : 36-46 %	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127035		Emmanuelle Saccomando
Hémoglobine	HGB	AB10	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Oxydation par SLS et photométrie	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	g/dl	< 1 jour : 14,0-22,0 g/dL#1 - 3 jours : 15,0-21,0 g/dL#3 - 7 jours : 13,5-21,5 g/dL#7 - 14 jours : 12,5-20,5 g/dL#14 jours - 1 mois : 11,5-16,5 g/dL#1 - 2 mois : 9,4-13,0 g/dL#2 mois - 1 an : 11,1-14,1 g/dL#1 - 6 ans : 11,0-14,0 g/dL#6-12 ans : 11,5-15,5 g/dL#> 12 ans (homme) : 13,0-17,0 g/dL#> 12 ans (femme) : 12,0-15,0 g/dL	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127013		Emmanuelle Saccomando
Plaquettes	PLT	AD10	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Impédance	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	10*3/mm3	< 1 jour : 100-450 (10*3/mm³)#1 - 3 jours : 210-500 (10*3/mm³)#3 - 7 jours : 160-500 (10*3/mm³)#7 - 14 jours : 170-500 (10*3/mm³)#14 jours - 1 mois : 200-500 (10*3/mm³)#1 - 2 mois : 210-650 (10*3/mm³)#2 - 6 mois : 200-550 (10*3/mm³)#6 mois- 1 an : 200-550 (10*3/mm³)#1 - 6 ans : 200-490 (10*3/mm³)#6-12 ans : 170-450 (10*3/mm³)#> 12 ans : 150-410 (10*3/mm³)	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127116		Emmanuelle Saccomando
Réticulocytes	RETI	AB69/AB70	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Cytométrie en flux avec fluorescence	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	% et 10*3/mm3	0,5-2,5 (%)#< 1 jour : 120-400 (10*3/mm³)#1 - 3 jours : 50-350 (10*3/mm³)#3 - 14 jours : 50-100 (10*3/mm³)#14 jours - 1 mois : 20-60 (10*3/mm³)#1 - 2 mois : 30-50 (10*3/mm³)#2 - 6 mois : 40-100 (10*3/mm³)#6 mois- 12 an : 30-100 (10*3/mm³)# > 12 ans : 50-100 (10*3/mm³)	Stable 72 heures entre 2 et 8°C	127131		Emmanuelle Saccomando
Volume Globul. Moyen	MCV	AB40	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Calcul	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	fl	< 1 jour : 100,0-120,0#1 - 3 jours : 92,0-118,0#3 - 7 jours : 88,0-126,0#7 - 14 jours : 86,0-124,0#14 jours - 1 mois : 92,0-116,0#1 - 2 mois : 87,0-103,0#2 - 6 mois : 68,0-84,0#6 mois- 1 an : 72,0-84,0#1 - 6 ans : 75,0-87,0#6-12 ans : 77,0-95,0 #> 12 ans : 83,0-101,0			Emmanuelle Saccomando	
Teneur Corpus. Moyenne	MCH	AB41	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Calcul	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	pg	<14 jours : 31,0-37,0#14 jours - 1 mois : 30,0-36,0#1 - 2 mois : 27,0-33,0#2 - 6 mois : 24,0-30,0#6 mois- 1 an : 25,0-29,0#1 - 6 ans : 24,0-30,0#6-12 ans : 25,0-33,0# > 12 ans : 27,0-32,0			Emmanuelle Saccomando	
Conc. Corpus. Moyenne	MCHC	AB42	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Calcul	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	g/dL	< 1 jour : 30,0-36,0#1 - 3 jours : 29,0-37,0#3 - 14 jours : 28,0-38,0#14 jours - 1 mois : 29,0-37,0#1 - 2 mois : 28,5-35,5#2 - 6 mois : 30,0-36,0#6 mois- 1 an : 32,0-36,0#1 - 12 ans : 31,0-37,0#> 12 ans : 31,5-34,5			Emmanuelle Saccomando	
Fraction plaquettes immatures	IPF		OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL	Cytométrie en flux avec fluorescence	XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	%	1,5-5,8				Emmanuelle Saccomando
Volume Plaq. Moyen	MPV	AD20	OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL		XN Serie Sysmex *	7 jours/7	1 j	fl	8,7-12,0				Emmanuelle Saccomando

Vitesse de sédimentation	VS	BA00	NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	4,0 mL	sédimentation	Starssed Interliner V8	7 jours/7	mm/h	Homme :# <50ans: <10 mm/h#50-60ans: <12 mm/h#60-70ans:<14 mm/h#>70ans: <30 mm/h# Femme :#<50ans: <12 mm/h#50-60ans: <19 mm/h#60-70ans:<20 mm/h#>70ans: <35 mm/h	127153	Emmanuelle Saccomando
Rech. de schizocytes/ Morphologie GR	SCHIZ			Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	/1000 GR	<5/1000 GR		Emmanuelle Saccomando
Kleihauer (cytochimie)	KLEI		NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	pour 1000 globules rouges		555136	Emmanuelle Saccomando
Cytochimie de PERLS	PERLS		NON	Ponction médullaire				Poste manuel cytologie	5 jours/7	%			Emmanuelle Saccomando
Médullogramme	MOELC		NON	Ponction médullaire				Poste manuel cytologie	5 jours/7	%		553055	Emmanuelle Saccomando
Liquide de ponction: numération et formule LCR: numération et formule	LIQC		NON	Ponction	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	/mm³ et %		550771	Emmanuelle Saccomando
	LCRC		OUI	LCR	Tube fond conique stérile	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	/mm³ et %		549522-549544	Emmanuelle Saccomando
LBA: numération et formule	LBAC		NON	LBA	Pot stérile	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	/mm³ et %		550771	Emmanuelle Saccomando
Parasites sanguins	PASG		OUI	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	1,0 mL		Poste manuel cytologie	7 jours/7	Négatif		127094	Emmanuelle Saccomando
Cryohémolyse	CRYOH		NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	4,0 mL		Poste manuel cytologie	5 jours/7	%	<12	553254	Emmanuelle Saccomando

Analyses				PRE-ANALYTIQUE				ANALYTIQUE						NOMENCLATURE INAMI			Intérêt scientifique et commentaire		
Analyse	Mnémonique	ACTH	Réalisable en urgence	Type d'échantillons	Matériel_1	Volume minimal à prélever	Traitement	Technique	Méthode et appareil	Fréquence de réalisation	TAT	Unités	Valeurs de référence	Code INAMI	Pseudocode	Tarification à charge patient	Intérêt médical et scientifique	Commentaire	Responsable Technique
Typage lymphocytaire sur sang (T, B et NK)	MULTI	AG32 - AG35 - AG37 - AG16 - AG42	NON	Sang total EDTA	Tube EDTA (bouchon mauve)	4,0 mL		fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	% et /µL		555693			L'immunophénotypage lymphocytaire a pour but d'évaluer les proportions des différentes sous-populations dans le cadre d'infections, de maladies auto-immunes, de déficits immunitaires ou de syndromes lymphoprolifératifs.		Emmanuelle Saccomando
Typage lymphocytaire sur LCR	LCRLST		NON	Liquide céphalorachidien	Tube fond conique stérile			fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	%					L'immunophénotypage sur liquide céphalorachidien a pour but le diagnostic de néoplasies d'origine hématologique (lymphome, leucémie).		
Typage lymphocytaire sur liquide	LIQT		NON	Liquide de ponction	Tube EDTA (bouchon mauve)	4,0 mL		fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	%					L'immunophénotypage sur liquide de ponction a pour but le diagnostic de néoplasies d'origine hématologique (lymphome, leucémie).		Emmanuelle Saccomando
Typage lymphocytaire sur biopsie	GGLT		NON	Biopsie	Pot stérile		dilacération de la masse	fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	%					L'immunophénotypage sur biopsie a pour but le diagnostic de néoplasies d'origine hématologique (lymphome, leucémie).		Emmanuelle Saccomando
Typage sur ponction de moelle	MOELT		NON	Ponction médullaire	Tube EDTA			fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	%							
Typage lymphocytaire sur lavage bronchoalvéolaire LBA	LBAMULTI		NON	Lavage broncho-alvéolaire	Pot stérile		filtration sur gaze	fluorocytométrie	FacsLyric BD®	5 jours/7	3 j	%	CD3: 90,0 - 98,0#CD4: 35,0 - 79,0#CD8: 15,0 - 57,0#CD19: 0,5 - 3,0#CD16/56: 2,0 - 8,0	555693			L'immunophénotypage lymphocytaire sur lavage bronchoalvéolaire a pour but d'évaluer les proportions des différentes sous-populations dans un but d'aiguiller le diagnostic de certaines pneumopathies.		Emmanuelle Saccomando
Anticorps antiplaquettes fixés de type IgG	APLAQ	AF65	NON	Sang total citraté	Tube citraté (bouchon bleu)	2,7 mL		fluorocytométrie	FacsLyric BD®	4 jours/7	3 j		Négatif CD41 (GpIb): 37000 - 65000#CD42B (GpIb): 27000 - 49000#CD62P (GMP140):	555634			Mise en évidence de la fixation d'anticorps (allo et auto) sur les plaquettes dans le cadre du diagnostic de thrombopénies d'origine immunologique.	Le prélèvement doit être réalisé et parvenir au laboratoire de l'hôpital Marie Curie tous les jours avant 15h00. #Si le taux de plaquettes est supérieur à 150 000/µL, la réalisation du test sera soumis à l'approbation du biologiste.	Emmanuelle Saccomando
Glycoprotéines plaquettaires (GpIb, GpIba, GMP140)	PLT_GP	CA005 - CA00C - CA002	NON	Sang total citraté	Tube citraté (bouchon bleu)	2,7 mL		fluorocytométrie	FacsLyric BD®	1X/mois	3 j	/plaquettes	<1000		971324	60,0 euros	La quantification des glycoprotéines plaquettaires permet la détection de thrombopathies constitutives dues à des défauts quantitatifs de glycoprotéines ou de réactivité plaquettaire.	Analyse réalisée uniquement sur rendez-vous.	Emmanuelle Saccomando
Test à la mépacrine	MEPA	CA00L - CA00M	NON	Sang total citraté	Tube citraté (bouchon bleu)	2,7 mL		fluorocytométrie	FacsLyric BD®	1X/mois	3 j	U arb.	Mépacrine capture: 3,9 - 6,5#Mépacrine relâche: 1,6 - 4,0	545495			Test permettant d'évaluer la capacité fonctionnelle des plaquettes à capter et libérer les granulations denses dans le cadre de thrombopathies de type δ-storage pool disease.	Analyse réalisée uniquement sur rendez-vous. #Le patient doit être à jeun et au repos.	Emmanuelle Saccomando

Analyses				PRE-ANALYTIQUE							ANALYTIQUE		NOMENCLATURE INAMI					Intérêt scientifique et commentaire					
Analyse	Mnémonique	ACTH	Réalisable en urgence	Type d'échantillons	Matériel	1	Volume minimal à prélever	Autre type d'échantillon	Traitement	Détails matériel	Délai maximum du pré analytique	Méthode et appareil	Fréquence de réalisation	TAT	Unités	Valeurs de référence	Conservation	Code INAMI	Intérêt médical et scientifique	Commentaire	Responsable Technique		
Temps de Quick	TQ	CA30	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)						Délai entre le prélèvement et la réalisation des tests : # idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	Temps de coagulation d'un plasma en présence d'un excès de thromboplastine et de calcium STARMAX3	7 jours/7	90 min	% # INR	70 - 102 # 0,8-1,2	sérothèque 24h: 1° entre 2 et 8 degrés		554573	Le test explorant la voie « extrinsèque » de la coagulation (facteur VII, X,V,II) ainsi que la conversion du fibrinogène en fibrine; suivi thérapeutique des patients traités par AVK.	Remplissage : 90% recommandé, 80% acceptable. Alq TP - analyse sur tube primaire ou une aliquote de celui-ci	Saccomando Emmanuelle	
Temps de céphaline activateur	TCA	CA34	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml			Délai entre le prélèvement et la réalisation des tests : # Ne doit pas dépasser 4 heures et patient sous HNF < 1 heure.	Temps de recalcification en présence de céphaline(phospholipides, utilisés comme substitut) et d'un activateur particulaire qui active la phase de contact. STARMAX3	7 jours/7	90 min	sec	28 - 40	sérothèque 24h: 1° entre 2 et 8 degrés		554676	Le TCA permet d'explorer globalement l'ensemble des facteurs de la coagulation dits de la voie intrinsèque. Cet examen sert à dépister les déficits des facteurs de cette voie, dont les facteurs VIII et IX (responsables des hémophilies A et B), à détecter l'anticoagulant lupique (anticorps pathologique retrouvé parfois dans le lupus érythémateux disséminé et responsable de thromboses) et à surveiller les traitements anticoagulants par l'héparine standard	Remplissage : 90% recommandé, 80% acceptable. Alq TP - analyse sur tube primaire ou une aliquote de celui-ci	Saccomando Emmanuelle	
Fibrinogène	FIBRI	CA40A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml			Délai entre le prélèvement et la réalisation des tests : # idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	Méthode de Claus:dosage enzymatique du fibrinogène par la thrombine. StarMax3	7 jours/7	90 min	g/L	2,0 - 4,0	sérothèque 24h: 1° entre 2 et 8 degrés		554610	Bilan d'exploration des syndromes hémorragiques. Protéine de la phase aiguë de l'inflammation.	Alq TP - analyse sur tube primaire ou une aliquote de celui-ci	Saccomando Emmanuelle	
Fibrinogène dérivé	FIBACL	CA40C	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)			PPP 0,7-1,0 ml				BCS	7 jours/7	1 j	g/L	2,0 - 4,0						Saccomando Emmanuelle	
Temps de thrombine	TT	CA40D	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml				STARMAX3	7 jours/7	1 j	sec	< 22				554551	Diagnostic différentiel hypo versus dysfibrinogénémie		Saccomando Emmanuelle
D-Dimères	DDI	CA60A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml			Délai entre le prélèvement et la réalisation des tests : # idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	Dosage immuno-turbidimétrique. STARMAX3	7 jours/7	90 min	µg/mL	< 0,50	sérothèque 24h: 1° entre 2 et 8 degrés		554455	Le dosage des D-dimères a une grande valeur prédictive négative (VPN). Un résultat normal permet l'exclusion du diagnostic de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Si le taux de D-dimères s'avère élevé, il y a une suspicion de la présence d'un caillot indiquant une possible thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire.	Remplissage : 90% recommandé, 80% acceptable. Alq TP - analyse sur tube primaire ou une aliquote de celui-ci	Saccomando Emmanuelle	
Facteur II	fac2	CA65A	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq A PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 120			554190			Saccomando Emmanuelle	
Facteur V	fac5	CA65B	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq A PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 120			554713			Saccomando Emmanuelle	
Facteur VII	fac7	CA65E	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq A PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 120			554234			Saccomando Emmanuelle	
Facteur X	fac10	CA65D	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq A PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 120			554735			Saccomando Emmanuelle	
Facteur VIII	fac8c	CA65F	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq B PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 160			554256			Saccomando Emmanuelle	
Facteur IX	fac9	CA65G	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq B PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	50 - 150			554315			Saccomando Emmanuelle	
Facteur XI	fac11	CA65H	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq B PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	50 - 150			554330			Saccomando Emmanuelle	
Facteur XII	fac12	CA65I	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq B PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	50 - 150			554352			Saccomando Emmanuelle	
Facteur XIII activité	fac13	CA65W	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq B PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS			21 j	%	70 - 140		554374			Saccomando Emmanuelle	
Facteur Willebrand antigène	VWAG	CA05D	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3		7 j	%	60 - 160			554271			Saccomando Emmanuelle	
Facteur Willebrand Ristocetin Cofacteur	VWRC	CA05E	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq C PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	60 - 160			554293			Saccomando Emmanuelle	
Facteur Willebrand activité (GP1BM)	VWGP1BM	CA05H	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq C PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		14 j	%	60 - 160			554293	Exploration d'une diathèse hémorragie. Recherche des anomalies du domaine A1. Sensibilité pas totalement superposable au vWf :RCo. Non cumulable avec ce dernier		Saccomando Emmanuelle	
Antithrombine (a-IIa)	AT3	CA70A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml			idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3		1 j	%	80 - 120			554094			Saccomando Emmanuelle	
Protéine C chromogène	PRTC	CA80	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)			Alq E PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3		120 j	%	70 - 130			554131			Saccomando Emmanuelle	
Protéine C coagulante	PRTCC	CA80A	non	PFP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3		7 j	%	70 - 130			554131	Bilan de thrombophilie de seconde intention. Les méthodes de routines ne détectent que 80 % des déficits en Protéines C et S de type 2. Interférence par les anticoagulants, le F V Leiden et les ac lupiques. (1 fois par trimestre)		Saccomando Emmanuelle	
Protéine S antigénique libre	PRTS	CA81C	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	Alq E PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS		7 j	%	70 - 130			554153			Saccomando Emmanuelle	
Protéine S coagulante	PRTSC	CA81A	non	PFP	Tube coagulation (bouchon bleu)		2,25 ou 3,15 ml	PPP 0,7-1,0 ml			congélation idéalément < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3		120 j	%	70 - 130			554153	Bilan de thrombophilie de seconde intention. Les méthodes de routines ne détectent que 80 % des déficits en Protéines C et S de type 2. Interférence par les anticoagulants, le F V Leiden et les ac lupiques. (1 fois par trimestre)		Saccomando Emmanuelle	

Dépiantage F V Leiden	DFVL	CA810	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS	14 j			554691	Sacomando Emmanuelle
Résistance protéine C activée (1er génération)	APCRG1	CA81M	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS	21 j			554691	Sacomando Emmanuelle
Plasminogène	PLG	CA08E	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq.E PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS	14 j	%	70 - 150	554470	Sacomando Emmanuelle
Antiplasmine	APLAS	CA08F	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq.E PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	BCS	14 j	%	70 - 130		Sacomando Emmanuelle
Lyse de Euglobulines	ELT	CC03A	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	PPP 1,5 ml	centrifugation	tube à plonger immédiatement dans la glace fondante centrifugation < 30 minutes, congélation < 2 heures congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	Lysis Timer	5 j	min	H: 118 - 303 # F: 100 - 174	554175	Sacomando Emmanuelle
Anticoagulant lupique	ACLU	CA91	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	PPP 1,5 ml	centrifugation		STARMAX3	7 j		négatif	554072	Sacomando Emmanuelle
Agrégation plaquettaire	AGRE	CA010	non	PRP	Tube coagulation (bouchon bleu)			centrifugation 900g		ThromboSoft	1 i			554013	Sacomando Emmanuelle
PFA Collagène-épinéphrine	PFAE	CA07B	non	Sg Citraté	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml		sur sang total	> 1heure et < 4 heures	PFA-200	1 j	sec	85-165	554750	Sacomando Emmanuelle
PFA Collagène-ADP	PFAA	CA07C	non	Sg Citraté	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml		sur sang total	> 1heure et < 4 heures	PFA-200	1 i	sec	71-118	554750	Sacomando Emmanuelle
PFA P2Y Recherche inhibiteur spécifique	PFAP2Y	CA07D	non	Sg Citraté	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml		sur sang total	> 1heure et < 4 heures congélation idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	PFA-200	1 j	sec	60 - 106	554750	Sacomando Emmanuelle
	RINS	CA65L	non	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	PPP 2,0 ml	centrifugation		STARMAX3	5 j		négatif	554050	Sacomando Emmanuelle
Prothrombine résiduelle	PTRES	CA59U	non						tube spécial - tube en verre mouillé	STARMAX3	14 j	%	< 10	554492	Sacomando Emmanuelle
Apixaban	API	CD05A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			553313	Sacomando Emmanuelle
Edoxaban	EDOX	CD07A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			553313	Sacomando Emmanuelle
Rivaroxaban	RIVA	CD04A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			553313	Sacomando Emmanuelle
Dabigatran	DABI	CD06A	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			553313	Sacomando Emmanuelle

												moléculaires, zones thérapeutiques # Enoxaparine 40 mg/jour pic 3-4h 0.32 - 0.54 UI anti-Xa/ml # Enoxaparine 1 mg/kg/12h pic 3-4h 1.03 - 1.37 UI anti-Xa/ml vallée 0.52 UI anti-Xa/ml # Enoxaparine 1.5 mg/kg/jour pic 4-6h 1.10 - 1.70 UI anti-Xa/ml vallée 0.13 UI anti-Xa/ml # Nadroparine 171 UI/kg/jour pic 4-6h 1.19 - 1.40 UI anti-Xa/ml (surdosage >1.8) # Tinzaparine 4500 UI/jour HNF 400-800 UI/kg/24h perf. continue 0.3 - 0.7 UI anti-Xa/ml # Toute présence d'un autre anticoagulant à activité anti-Xa fausse le résultat		Saccomando Emmanuelle
Héparine de bas PM	HBPM	CA90B	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			
Héparine non fractionnée	HNF	CA90E	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			Saccomando Emmanuelle
Fondaparinux	FONDA	CD03	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j			Saccomando Emmanuelle
Danaparoïde sulfate	DANA	CD02	oui	PPP	Tube coagulation (bouchon bleu)	2,25 ou 3,15 ml	Alq TP PPP 0,7-1,0 ml	centrifugation	idéalement < 2 heures et ne doit pas dépasser 4 heures.	STARMAX3	1 j	Zones thérapeutiques : 0.5 - 0.8 UI anti Xa/ml Toute présence d'un autre anticoagulant à activité anti-Xa fausse le résultat.		Saccomando Emmanuelle